

One Step Marijuana Test

Katalog No. W19-S

Wondfo One Step Marijuana Test er en hurtig test som brukes til å påvise marijuana/cannabis og dets viktigste metabolitter i urinen ved et spesifisert nivå. Kun til hjemmebruk.

Hva er deteksjonsnivået og den omtrentlige reaksjonstid?

Identifikator	Deteksjonsnivå	Minimum deteksjonstid	Maksimum deteksjonstid
Marijuana (THC)	50ng/mL	2 timer	Opptil 5+ dager

FORHOLDSREGLER

1. Dette settet er kun til utvortes bruk. Må ikke svelges.
2. Kastes etter bruk. Testen kan ikke brukes mer enn én gang.
3. Ikke bruk testsettet etter utløpsdato.
4. Ikke bruk settet hvis posen er skadet eller ikke er godt forseglet.
5. Oppbevares utilgjengelig for barn.
6. Ikke avles resultatet etter 5 minutter

INNHold I PAKKEN

1. Posen inneholder en test og et tørkemiddel. Tørkemiddelet er bare for tørking, og er ikke brukt i testens prosedyrer.
2. Hefte med instruksjoner for bruk.

OPPBEVARING OG STABILITET

Oppbevares ved 4 ° C ~ 30 ° C i den forseglede posen frem til utløpsdato.

Holdes unna direkte sollys, fuktighet og varme.

Må IKKE FRYSES.

PRØVETAKING OG KLARGJØRING

NÅR TA EN URINPRØVE?

Du kan ta en urinprøve innenfor minimum deteksjonstid, hvis det er mistanke om narkotikabruk. Tidspunktet for urinprøven er viktig, fordi stoffet kan være klarert av kroppen og påvist i urinen. Vennligst se avsnittet Hva er deteksjonsnivået og den omtrentlige reaksjonstid?.

HVORDAN SAMLE EN URINPRØVE?


Ta urinprøven i en kopp.

TESTPROSEDYRE

Testen må foretas i romtemperatur (10 ° C til 30 ° C)

1. Ta teststrimmelen ut av den forseglede posen.
2. Dypp strimmelen i urinen med pilen pekende mot urinen. Ta testen ut etter minst 10 sekunder og legg den flatt på et rent, tørt, ikke-absorberende underlag (for eksempel munningen av urin containeren).
3. Les resultatet etter 5 minutter. Ikke les resultatene når det er gått mer enn 5 minutter.

VIKTIG: Ikke la urinen overstige MAX nivået (markert linje) - testen vil ikke utføres korrekt.

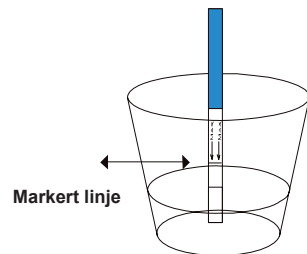

TOLKNING AV RESULTATER

Positiv (+)

En rosa strek er synlig i kontrollsonen, men det vises ingen farge i testregionen. Dette positive resultat indikerer at marijuanakonsentrasjonen er lik med eller høyere enn deteksjonsgrensen (50 ng / ml).


Negativ (-)

En rosa strek er synlig både i kontroll- og testområdet. Dette negative resultat indikerer at marijuanakonsentrasjonen er 0 eller ligger under deteksjonsgrensen (50 ng / ml).

Ugyldig

Hvis det ikke vises en strek i kontrollområdet, men det ses en strek synlig i testområdet er testen ugyldig. En annen test bør gjennomføres for å revurdere prøven. Hvis testen fortsatt mislykkes, ta kontakt med forhandleren eller butikken der du kjøpte produktet og oppgi testens lot-nummer.

Merk: Linjens fargeintensitet eller bredde tilskrives ingen betydning.

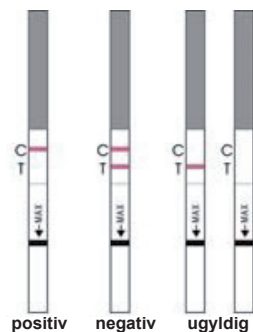

Et foreløpig positivt testresultat betyr ikke alltid at en person tar ulovlige rusmidler, og et negativt testresultat betyr ikke alltid at en person ikke tar ulovlige rusmidler. Det er en rekke faktorer som påvirker påliteligheten av stoffet som testes.

VIKTIG: Resultatet er kalt foreløpig av en grunn. Prøven skal testes av et laboratorium for å avgjøre om et medikament misbruk faktisk er til stede.

Hva er en falsk positiv test?

Definisjonen av en falsk positiv test ville være hvor et stoff er identifisert feil ved bruk av Wondfo One Step Marijuana urintest. De vanligste årsakene til en falsk positiv test er kryssreaksjoner. Visse matvarer, medisiner, slankemidler og kosttilskudd kan gi et falskt positivt testresultat med dette produkt.

Hva er en falsk negativ test?

Definisjonen av en falsk negativ test er at det opprinnelige stoffet er til stede, men er ikke oppdaget av Wondfo One Step Marijuana urintest. Dersom prøven er forfortynnet eller forfalsket kan det resultere i et falskt negativt resultat.

BEGRENSNINGER AV PROSEDYRE

1. Testens ytelsesevne har ikke vært underbygd ved hjelp av andre prøver.
2. Urinprøver blandet med urenheter (forfalskede prøver) kan gi feilaktige resultater. Sterke oksidasjonsmidler som blekemiddel (hypokloritt) kan påvirke stoffets analytter. Dersom en prøve er mistenkt for å være forfalsket, skaff så en ny.
3. Denne test fungerer som en kvalitativ screening analyse. Den er ikke designet for å avgjøre den kvantitative konsentrasjon av narkotika eller graden av beruselse.
4. Det er mulig at tekniske eller prosedyremessige feil kan oppstå, samt at andre forstyrrende stoffer i urinprøven kan gi feilaktige resultater.
5. Et negativt resultat behøver ikke nødvendigvis indikere rusfri urin. Negative resultater kan oppnås når stoffet er til stede og ligger under testens sensitivitetnivå.
6. Testen skiller ikke mellom rusmisbruk og visse legemidler.
7. Et positivt resultat kan fås fra visse matvarer eller kosttilskudd.

SPØRSMÅL OG SVAR

Kan en svak linje indikere et negativt resultat?

Ja, svake linjer indikerer negative resultater. Tilstedeværelsen av en test-linje, uavhengig av hvor lys den er, indikerer et negativt resultat.

Betyr en svak linje at det er medikamenter tilstede i urinen?

Tilstedeværelsen av en test-linje, uansett hvor svak, indikerer et negativt resultat. Selv om det er stoff i urinen kan det ligge under det spesifiserte minimumsnivå, som gjør at man ikke kan vurdere testen som positiv og derfor anses den som negativ.

Barnet mitt innrømmet bruk av narkotika for en uke siden, men jeg fikk et negativt resultat. Hvorfor?

De fleste medikamenter er eliminert fra kroppen i løpet av få dager med unntak av kronisk marijuanabruk. Dersom barnet ditt innrømmet bruk av marijuana, og ikke er kronisk røyker (hverdags røyker), er stoffet sannsynligvis forsvunnet fra kroppen før testen ble tatt.

Kan jeg bruke urin fra toalettet til å teste med?

Nei. Urinen i toalettet har blitt forfortynnet og kan ha vært utsatt for rengjøringsmidler som kan påvirke testresultatene. Vi anbefaler ikke å bruke urin som samles på denne måten.

Hva betyr foreløpig resultat?

Dette betyr at testen har reagert med noe i prøven og må derfor sendes til laboratoriet for et mer nøyaktig svar.

HT SYMBOLER PÅ PAKKEN



Beskytt fra direkte sollys



Oppbevar mellom 4°C og 30°C



Oppbevares tørt



Gjenbrukes ikke

Produsent:

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.
No.8 Lizhishan Road
Science City, Luogang District
510663 Guangzhou
P.R. Kina

Autorisert representant:

Qarad b.v.b.a.
Cipalstraat 3
B-2440 GEEL, Belgia