

# One Step Multi-Drug Urin Test Panel Katalog No. se forpakning

Wondfo One Step Multi-Drug Test er en hurtig test som brukes til å påvise narkotiske stoffer og dets viktigste metabolitter i urinen ved et spesifisert nivå. Kun til hjemmebruk.

Den tester for følgende 5 narkotiske stoffer: Amfetamin (AMP), kokain (COC), marijuana (THC), metylendioksymetamfetamin (MDMA), fensyklidin (PCP).

## Hva er deteksjonsnivået og den omtrentlige reaksjonstid?

Preparat	Deteksjonsnivå	Minimum deteksjonstid	Maksimum deteksjonstid
Amfetamin (AMP)	1.000 ng/mL	2-7 timer	1-2 dager
Kokain (COC)	300 ng/mL	1-4 timer	2-4 dager
Marijuana/ Cannabis (THC)	50 ng/mL	2 timer	Opptil 5+ dager
Metylendioksy-metamfetamin/ Ecstasy (MDMA)	500 ng/mL	2-7 timer	2-4 dager
Fensyklidin (PCP)	25 ng/mL	4-6 timer	7-14 dager

## FORHOLDSREGLER

1. Dette settet er kun til utvortes bruk. Må ikke svelges.
2. Kastes etter bruk. Testen kan ikke brukes mer enn én gang.
3. Ikke bruk testsettet etter utløpsdato.
4. Ikke bruk settet hvis posen er skadet eller ikke er godt forseglest.
5. Oppbevares utilgjengelig for barn.
6. Ikke avles resultatet etter 5 minutter

## INNHOLD I PAKKEN

1. Posen inneholder en test og et tørkemiddel. Tørkemiddelet er bare for tørking, og er ikke brukt i testens prosedyrer.
2. Hefte med instruksjoner for bruk.

## OPPBEVARING OG STABILITET

Oppbevares ved 4 ° C ~ 30 ° C i den forseglede posen frem til utløpsdato.

Holdes unna direkte sollys, fuktighet og varme.

**Må IKKE FRYSES.**

## PRØVETAKING OG KLARGJØRING

### NÅR TA EN URINPRØVE?

Du kan ta en urinprøve innenfor minimum deteksjonstid, hvis det er mistanke om narkotikabruk. Tidspunktet for urinprøven er viktig, fordi stoffet kan være klarert av kroppen og påvist i urinen. Vennligst se avsnittet Hva er deteksjonsnivået og den omtrentlige reaksjonstid?.

### HVORDAN SAMLE EN URINPRØVE?


Ta urinprøven i en kopp.

## TESTPROSEDYRE

Testen må foretas i romtemperatur (10 ° C til 30 ° C)

1. Åpne den forseglede posen ved å rive langs hakket. Ta testen ut av posen.
2. Hold den ene siden av enheten med en hånd. Bruk den andre hånden til å dra av hetten.
3. Senk den absorberende enden ned i urinprøven i ca. 10 sekunder. Kontroller at urin-nivået ikke overstiger "MAX"-linjen trykt på forsiden av enheten.
4. Legg enheten flatt på et rent, tørt, ikke-absorberende underlag.
5. Les resultatet etter 5 minutter. Ikke les etter 5 minutter.

**VIKTIG:** Ikke dypp forbi den markerte strek

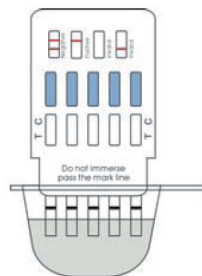

## TOLKNING AV RESULTATER

### Foreløpig positiv (+)

En rosa strek er synlig i kontrollsonen, men det vises ingen strek i testregionen. Det indikerer et positivt resultat.

### Negativ (-)

En rosa strek er synlig i kontroll- og testområdet. Dette negative resultat indikerer at konsentrasjonen er 0 eller ligger under deteksjonsgrensen.

### Ugyldig

Hvis det ikke vises en strek i kontrollområdet, men det ses en strek synlig i testområdet er testen ugyldig. En annen test bør gjennomføres for å revurdere prøven. Hvis testen fortsatt mislykkes, ta kontakt med forhandleren eller butikken der du kjøpte produktet og oppgi testens lot-nummer.

**Merk:** Linjens fargeintensitet eller bredde tilskrives ingen betydning



Et foreløpig positivt testresultat betyr ikke alltid at en person tar ulovlige rusmidler, og et negativt testresultat betyr ikke alltid at en person ikke tar ulovlige rusmidler. Det er en rekke faktorer som påvirker påliteligheten av stoffet som testes.

**VIKTIG:** Resultatet er kalt foreløpig av en grunn. Prøven skal testes av et laboratorium for å avgjøre om et rusmisbruk faktisk er til stede.

### Hva er en falsk positiv test?

Definisjonen av en falsk positiv test ville være når et stoff er identifisert feil ved bruk av Wondfo One Step Multi-Drug urintest. De vanligste årsakene til en falsk positiv test er kryssreaksjoner. Visse matvarer, medisiner, slankemidler og kosttilskudd kan gi et falskt positivt testresultat ved bruk av dette produkt.

### Hva er en falsk negativ test?

Definisjonen av en falsk negativ test er at det opprinnelige stoffet er til stede, men er ikke oppdaget av Wondfo One Step Multi-Drug urintest. Dersom prøven er fortyntet eller forfalsket kan det resultere i et falskt negativt resultat.

## BEGRENSNINGER AV PROSEDYRE

1. Testens ytelsesevne har ikke vært underbygd ved hjelp av andre prøver.
2. Urinprøve blandet med urenheter (forfalskede prøver) kan gi feilaktige resultater. Sterke oksidasjonsmidler som blekemiddel (hypokloritt) kan påvirke stoffets analytter. Dersom en prøve er mistenkt for å være forfalsket, skaff så en ny.
3. Denne test fungerer som en kvalitativ screening analyse. Den er ikke designet for å avgjøre den kvantitative konsentrasjon av narkotika eller graden av beruselse.
4. Det er mulig at tekniske eller prosedyremessige feil kan oppstå, samt at andre forstyrrende stoffer i urinprøven kan gi feilaktige resultater.
5. Et negativt resultat behøver ikke nødvendigvis indikere rusfri urin. Negative resultater kan oppnås når stoffet er til stede og ligger under testens sensitivetsnivå.
6. Testen skiller ikke mellom rusmisbruk og visse legemidler.
7. Et positivt resultat kan fås fra visse matvarer eller kosttilskudd.

## SPØRSMÅL OG SVAR

### Kan en svak linje indikere et negativt resultat?

Ja, svake linjer indikerer negative resultater. Tilstedeværelsen av en test-linje, uavhengig av hvor lys den er, indikerer et negativt resultat.

### Hvorfor vises noen linjer svakere enn andre?

Et minimum av stoffet må være til stede i urinprøven for at testenheten kan vurdere prøven som positiv. Hos noen rusmidler er minimum deteksjonsgrense relativt høy, som hos amfetamin (1000ng/mL). Hos andre er den relativt lav, som hos marijuana (50ng/mL). Jo lavere minimumsgrensen er, jo lysere vil linjen være i negativ urin.

### Betyr en svak linje at det er medikamenter tilstede i urinen?

Tilstedeværelsen av en test-linje, uansett hvor svak, indikerer et negativt resultat. Selv om det er spor av stoff i urinen kan det ligge under det spesifiserte minimumsnivå, som gjør at man ikke kan vurdere testen som positiv og derfor anses den som negativ.

### Barnet mitt innrømmet bruk av narkotika for en uke siden, men jeg fikk et negativt resultat. Hvorfor?

De fleste medikamenter er eliminert fra kroppen i løpet av få dager med unntak av kronisk marijuanabruk. Dersom barnet ditt innrømmet bruk av marijuana, og ikke er kronisk røyker (hverdags røyker), er stoffet sannsynligvis forsvunnet fra kroppen før testen ble tatt.

### Er det mulig at sekundær røyk vil føre til et positiv THC resultat?

Mens det har blitt vitenskapelig bevist at sekundær eksponering for marijuanarøyk vil føre noe av stoffet inn i kroppen, er det nesten umulig å inhalere en stor nok dose til at det forårsaker en positiv dopingtest.

### Kan jeg bruke urin fra toalettet til å teste med?

Nei. Urinen i toalettet har blitt fortyntet og kan ha vært utsatt for rengjøringsmidler som kan påvirke testresultatene. Vi anbefaler ikke å bruke urin som samles på denne måten.

### Hva er forskjellen mellom amfetamin og metamfetamin?

Metamfetamin er et sentralstimulerende stoff. Alt fra 4% -7% av metamfetamin brytes ned til amfetamin i kroppen, slik at en urinprøve tatt fra en bruker av metamfetamin vil inneholde både metamfetamin og amfetamin. Amfetamin er et sentralstimulerende stoff, ofte foreskrevet for å behandle ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) og fedme. De farmasøytiske navnene er Adderall, Benzedrin og Dexedrin. Mesteparten av amfetamin som er tilgjengelig på gaten er et resultat av at noen selger sin resept, eller har stjålet det fra andre. En urinprøve tatt fra en amfetamin bruker ville bare inneholde amfetamin (ingen metamfetamin ville være til stede).

### Hva betyr foreløpig resultat?

Dette betyr at testen har reagert med noe i prøven og må derfor sendes til laboratoriet for et mer nøyaktig svar.

## HT SYMBOLER PÅ PAKKEN



Beskytt fra direkte sollys



Oppbevar mellom 4°C og 30°C



Oppbevares tørt



Gjenbrukes ikke

## Produsent:

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.  
No.8 Lizhishan Road  
Science City, Luogang District  
510663 Guangzhou  
P.R. Kina

## Autorisert representant:

Qarad b.v.b.a.  
Cipalstraat 3  
B-2440 GEEL, Belgia